




etherea<sup>MX</sup>


# WSZYSTKIE KORZYŚCI KTÓRE OFERUJE CI TECHNOLOGIA IPL-SQ®

- ZAPOBIEGANIE STARZENIU SIĘ SKÓRY I JEJ TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM STYMULACJI KOLAGENU
- TERAPIA TRĄDZIKU, DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE I ANTYBAKTERYJNE
- TRWAŁA REDUKCJA OWŁOSIENIA WSZYSTKICH CZĘŚCI CIAŁA
- ZAMYKANIE DROBNYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH NA TWARZY I SKRZYDEŁKACH NOSA, TERAPIA TRĄDZIKU RÓŻOWATEGO I PAJĄCZKÓW ŻYLNÝCH;
- REDUKCJA PRZEBARWIEŃ POSŁONECZNYCH ORAZ INNYCH PRZEBARWIEŃ SKÓRY ZLOKALIZOWANYCH NA RĘKACH I TWARZY



 etherea<sup>MX</sup>





CAŁA MOC  
TECHNOLOGII DLA  
TWOJEJ URODY  
I DOBREGO  
SAMOPOCZUCIA

# TECHNOLOGIA, KTÓRA TROSZCZY SIĘ O CIEBIE

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii, ETHEREAMX® IPL-Sq® stanowi wyjątkową, wszechstronną i kompletną platformę zabiegową, która obejmuje szeroki zakres wskazań klinicznych i kosmetycznych, jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo i najwyższą skuteczność działania. Dowiedz się więcej o technologii opracowanej w celu poprawy Twojego wyglądu i samopoczucia.



# WSZYSTKIE KORZYŚCI KTÓRE OFERUJE CI TECHNOLOGIA IPL-SQ®

- PROFILAKTYKA I REDUKCJA **OZNAK PROCESU STARZENIA** SIĘ SKÓRY POPRZEZ INTENSYWNĄ STYMULACJĘ NEOKOLAGENEZY
- TERAPIA **TRĄDZIKU**, DZIAŁANIE PRZECIWPALNE ANTYBAKTERYJNE
- TRWAŁA I POSTĘPUJĄCA **DEPILACJA WSZYSTKICH CZĘŚCI CIAŁA**
- **ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH** ZLOKALIZOWANYCH NA TWARZY I SKRZYDEŁKACH NOSA, TERAPIA **TRĄDZIKU RÓŻOWATEGO** I **PAJĄCZKÓW ŻYLNÝCH**
- **REDUKCJA RUMIENIA**
- **ROZJAŚNIANIE PŁAM POSŁONECZNYCH** ORAZ INNYCH PRZEBARWIEŃ NA SKÓRZE RĄK I TWARZY



## ABY TWOJA SKÓRA WYGLĄDAŁA MŁODO I ATRAKCYJNIE

Wygładzenie skóry, zamknięcie rozszerzonych porów, rewitalizacja, redukcja bruzd i zmarszczek z ujednoczeniem kolorytu i ogólną poprawą stanu skóry, pobudzenie syntezy kolagenu dla ujędrnienia i poprawy napięcia skóry.

**LICZBA SESJI:** Od 4 do 8 zabiegów, w zależności od wskazań i oczekiwanych rezultatów.

**OCZEKIWANE REZULTATY:** Zmiany w ogólnym wyglądzie skóry widać już po pierwszym zabiegu. Im więcej sesji, tym lepsze rezultaty.

**BÓL:** Zabieg jest praktycznie bezbolesny, z lekkim i narastającym uczuciem ciepła.

**PIELĘGNACJA PO ZABIEGU:** Stosowanie kremów kojących lub balsamów i środków nawilżających przepisanych przez lekarza.

**REKONWALASCENCJA PO ZABIEGU:** Brak, natychmiastowy powrót do codziennych czynności.

## TERAPIA TRĄDZIKU

Terapia trądziku ze złagodzeniem stanów zapalnych oraz zmniejszeniem ilości zmian krostkowych.

**LICZBA SESJI:** Od 4 do 8 zabiegów, w zależności od wskazań i oczekiwanych rezultatów.

**OCZEKIWANE REZULTATY:** Zmniejszenie stanu zapalnego, redukcja populacji bakterii, znaczące przyspieszenie procesu regeneracji i gojenia skóry, zmniejszone ryzyko blizn.

**BÓL:** Zabieg jest praktycznie bezbolesny, z lekkim i narastającym uczuciem ciepła.

**PIELĘGNACJA PO ZABIEGU:** Stosowanie kremów kojących lub balsamów i środków nawilżających przepisanych przez lekarza.

**REKONWALASCENCJA PO ZABIEGU:** Brak, natychmiastowy powrót do codziennych czynności.

Więcej informacji na stronie 13.

## TRWAŁA REDUKCJA OWŁOSIENIA

Uszkodzenie i zniszczenie mieszków włosowych bezpośrednio po zabiegu, w efekcie czego dochodzi do postępującego w kolejnych miesiącach osłabienia wzrostu włosów.

**LICZBA SESJI:** Od 4 do 12 zabiegów, w zależności od wielkości leczonego obszaru, głębokości i grubości mieszków.

**OCZEKIWANE REZULTATY:** Uszkodzenie i zniszczenie mieszków włosowych bezpośrednio po zabiegu, osłabienie wzrostu włosów postępujące w kolejnych miesiącach.

**BÓL:** Lekkie uczucie szczypania, odczucie zbyt intensywnego nagrzewania lub skupione odczucie ciepła podczas naświetlania.

**PIELĘGNACJA PO ZABIEGU:** Stosowanie kremów kojących lub balsamów i środków nawilżających przepisanych przez lekarza.

**REKONWALESCENCJA PO ZABIEGU:** Brak, natychmiastowy powrót do codziennych czynności.

Więcej informacji na str. 16.

## TERAPIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY

Redukcja małych naczyń krwionośnych twarzy.

**LICZBA SESJI:** Od 1 do 4 zabiegów, w zależności od wielkości leczonego obszaru, średnicy i głębokości naczyń oraz rodzaju zmiany.

**OCZEKIWANE REZULTATY:** Natychmiastowe i tymczasowe obkurczenie i redukcja naczyń ze zmianą koloru; całkowite zamknięcie naczynek następuje stopniowo po kilku tygodniach od wykonania zabiegu.

**BÓL:** Lekkie uczucie szczypania, odczucie zbyt intensywnego nagrzewania lub skoncentrowane ciepło podczas naświetlania.

**PIELĘGNACJA PO ZABIEGU:** Stosowanie kremów lub balsamów kojących, przepisanych przez lekarza.

**REKONWALESCENCJA PO ZABIEGU:** Brak, natychmiastowy powrót do codziennych czynności.

Więcej informacji na str. 19.

## USUWANIE PLAM POSŁONECZNYCH

Usuwanie ciemnych zmian barwnikowych

**LICZBA SESJI:** Od 2 do 4 zabiegów, w zależności od liczby przebarwień, wielkości obszaru leczenia i ogólnego zabarwienia plam.

**OCZEKIWANE REZULTATY:** Chociaż rozjaśnienie plam może być widoczne pojawić się już po kilku dniach od zabiegu, zwykle trwałe rezultaty uzyskuje się po ok. 3-4 zabiegach.

**BÓL:** Lekkie uczucie szczypania, odczucie zbyt intensywnego nagrzewania lub skoncentrowane ciepło podczas naświetlania.

**PIELĘGNACJA PO ZABIEGU:** Stosowanie kremów kojących, balsamów i środków nawilżających przepisanych przez lekarza.

**REKONWALESCENCJA PO ZABIEGU:** Przez 1-2 dni po zabiegu należy poświęcić więcej uwagi na możliwe działania niepożądane, ale nie trzeba przerywać większości codziennych zajęć.

Więcej informacji na str. 21.



## IPL-SQ® ABY TWOJA SKÓRA NADAL WYGLĄDAŁA MŁODO

### KOMPLETNY PRZEWODNIK DLA PROFILAKTYKI STARZENIA I ODMŁADZANIA SKÓRY

ETHEREA-MX® IPL-SQ® oferuje zaawansowaną technologię, która stanowi doskonałą profilaktykę starzenia, poprzez stymulację syntezy kolagenu w głębszych warstwach skóry odmładzania skóry zabieg ma intensywne działanie odmładzające. Skóra jest wygładzona, ujędrniona i rozświetlona. ETHEREA-MX® IPL-SQ® oferuje szybkie, praktycznie bezbolesne zabiegi, które przynoszą długotrwałe rezultaty poprawy ogólnej kondycji skóry. Ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i czas rekonwalescencji są minimalne.



## 1 JAK TO DZIAŁA?

Emitowane przez IPL-Sq® światło o szerokim widmie działa bezpośrednio na skórę, pobudzając produkcję kolagenu w skórze, co przyczynia się do ujędrnienia i przyrostu tkanki na grubość. Pod wpływem światła zachodzi równomierne wytwarzanie i remodeling włókien kolagenowych i sprężystych (nadających skórze odpowiednio jędrność i sprężystość) oraz pobudzenie aktywności fibroblastów. Prowadzone badania wykazały, że zastosowana w IPL-Sq® technologia korzystnie wpływa na skórę - zarówno zapobiega jej starzeniu, jak i skutecznie odmładza .

## 2 JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA?

- zamknięcie rozszerzonych porów i wygładzenie powierzchni skóry, redukcja drobnych niedoskonałości i nierówności;
- rewitalizacja, rozjaśnienie i ujednoczenie kolorytu skóry;
- poprawa napięcia i ogólnej kondycji skóry;
- profilaktyka procesu starzenia się skóry, redukcja oznak starzenia.

## 3. ILE ZABIEGÓW NALEŻY WYKONAĆ?

Terapia odmładzająca z wykorzystaniem technologii IPL-Sq® obejmuje 4-8 zabiegów w serii, gdzie przerwy pomiędzy poszczególnymi zabiegami wynoszą trzy tygodnie. Zabiegi można łączyć z innymi technologiami. Porozmawiaj ze swoim lekarzem i zapytaj o najlepszy indywidualny plan leczenia.

## 4. KIEDY WIDAĆ PIERWSZE REZULTATY?

Rezultaty i poprawa kondycji skóry są na ogół natychmiastowe. Już po pierwszym zabiegu zauważysz pewne zmiany w ogólnym wyglądzie Twojej skóry. Jednak rzeczywiste i trwałe korzyści terapeutyczne po zastosowaniu ETHEREA IPL-Sq® widoczne są w kolejnych tygodniach, kiedy nastąpi proces neokolagenezy. Należy pamiętać, że do osiągnięcia optymalnych rezultatów potrzeba kilku sesji terapeutycznych.

## 5. CZY ZABIEGI SĄ BOLESNE?

Zabiegi są praktycznie bezbolesne. Niekiedy Pacjenci zgłaszają tylko nieznaczny dyskomfort związany z odczuwaniem ciepła - zwłaszcza w miejscu poddanym zabiegowi. W niektórych przypadkach intensywność terapii może przyczynić się do dyskomfortu.

Twój lekarz wskaże najlepszy sposób działania, aby zwiększyć komfort podczas terapii.

## 6. CZEGO NALEŻY OCZEKIWAĆ NATYCHMIAST PO ZABIEGU?

Prawdopodobne jest, że po zabiegu pojawi się zaczerwienienie i lekkie do umiarkowanego odczucie ciepła. Twoja skóra poddana zabiegowi będzie znacznie bardziej wrażliwa niż zwykle. Twój lekarz wskaże odpowiednie środki pielęgnacyjne, które mogą obejmować - oprócz aplikacji kremu lub emulsji przeciwśłonecznej - zastosowanie okładów z lodu, kremów kojących i nawilżających, aby wspomóc proces regeneracji skóry, zwłaszcza w pierwszych dniach po zabiegu.

## 7. CZY ZALECANA JEST SPECJALNA PIEŁĘGNACJA SKÓRY PO ZABIEGU?

Oprócz ochrony przeciwśłonecznej, lekarz może zalecić systematyczne i długotrwałe stosowanie określonych kosmetyków. Pamiętaj również, że nawet przy ciągłym i niezbędnym stosowaniu kremów z filtrem przeciwśłonecznym, należy zachować szczególną ostrożność przy bezpośredniej i pośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, ponieważ przez pewien czas Twoja skóra będzie wyjątkowo wrażliwa.

## 8. ILE MOŻE POTRWAĆ REKONWALESCENCJA?

Powrót do codziennej aktywności jest natychmiastowy, od razu po zabiegu można powrócić do codziennych zajęć.

# IPL-SQ® W TERAPII TRĄDZIKU



## NOWE SPOJRZENIE NA ZDROWIE SKÓRY BEZ TRĄDZIKU

Technologia ETHEREA-MX® IPL-Sq® jest z powodzeniem stosowana w terapii trądziku pospolitego ze względu na bezpośrednie oddziaływanie na stany zapalne i zmiany krostkowe. Technologię ETHEREA-MX® PL-Sq® opracowano w celu precyzyjnego oddziaływania na bakterie zasiedlające gruczoły łojowe, co gwarantuje doskonałe rezultaty terapeutyczne i bezpieczeństwo Pacjenta. W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod leczenia, które często polegają na stosowaniu leków doustnych, IPL-Sq® nie przyczynia się do jakichkolwiek ogólnoustrojowych skutków ubocznych, ani nie wpływa na Twoje codzienne życie.

# TRĄDZIK AKTYWNY

Trądzik jest problemem dotykającym tysiące mężczyzn i kobiet na całym świecie. Chociaż trądzik występuje częściej w wieku młodzieńczym, to zdarza się również w innych grupach wiekowych, przyczyniając się do dyskomfortu oraz obniżenia poczucia własnej wartości. Oprócz podawania miejscowych i doustnych antybiotyków, nowoczesna technologia zapewnia nowe możliwości leczenia, takie jak technologia IPL, która zyskała popularność w ostatnich latach, stając się synonimem bezpieczeństwa i skuteczności.

## PRZYCZYNY

Główna przyczyna trądziku wiąże się z zaburzeniami w gospodarce hormonalnej, gruczoły łojowe wydzielają nadmiar sebum, co powoduje niedrożność porów i w konsekwencji kolonizację bakterii (zwłaszcza *Propionibacterium acnes*). W ten sposób powstają zaskórniki, grudki i krosty, pojawia się stan zapalny.

### 1. JAK TO DZIAŁA?

Cały sekret technologii IPL-Sq® polega na wiązce światła, która oddziałuje na tkankę w selektywny i kontrolowany sposób, poprzez przekształcenie energii świetlnej w ciepło. Wpływa to szczególnie na bakterie *Propionobacterium acnes*, które powodują trądzik. Stopniowe ograniczenie populacji bakterii i wpływ na gruczoły łojowe przyczynia się do redukcji zmian zapalnych. Nie dochodzi do uszkodzenia naskórka, ponieważ światło przenika w głąb tkanki.

### 2. JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA?

- trądzik aktywny zlokalizowany w różnych miejscach na twarzy i ciele;
- redukcja stanu zapalnego i ilości zmian trądzikowych.

### 3. ILE ZABIEGÓW NALEŻY WYKONAĆ?

Zaleca się serię złożoną z 4-8 zabiegów, choć po zakończeniu terapii przez pewien czas mogą być potrzebne okresowe zabiegi podtrzymujące efekt. Przebieg terapii należy zawsze dostosować do indywidualnego stanu pacjenta, a jego ogólna skuteczność zależy od szeregu czynników. Porozmawiaj ze swoim lekarzem i dowiedz się, jaki rodzaj terapii będzie dla Ciebie najlepszy.

#### 4. KIEDY WIDAĆ PIERWSZE REZULTATY?

Pierwsze efekty terapeutyczne pojawiają się praktycznie w ciągu 1-2 dni po zabiegu - zwykle w postaci złagodzenia stanu zapalnego i redukcji ilości zmian trądzikowych. Pamiętaj - żeby rezultaty terapii były naprawdę skuteczne i widoczne, należy zabiegi te powtarzać. O ilości zabiegów decyduje Twój lekarz na podstawie indywidualnego wywiadu i ocenie stanu skóry.

#### 5. CZY ZABIEGI SĄ BOLESNE?

Zabieg ten jest praktycznie bezbolesny, pacjenci zgłaszają tylko odczucie ciepła, zwłaszcza w miejscu poddanym zabiegowi. W niektórych przypadkach intensywność terapii może powodować dyskomfort. Twój lekarz wskaże najlepszy sposób działania, aby zwiększyć komfort podczas terapii.

#### 6. CZEGO NALEŻY OCZEKIWAĆ NATYCHMIAST PO ZABIEGU?

Pod koniec zabiegu może pojawić się zaczerwienienie i lekkie do umiarkowanego odczucie ciepła. Twoja skóra w miejscu zabiegu będzie znacznie bardziej wrażliwa niż zwykle. Twój lekarz wskaże najbardziej odpowiednie środki pielęgnacji po zabiegu, które mogą obejmować - oprócz nałożenia kremu lub emulsji przeciwśłonecznej - zastosowanie okładów z lodu, kremów kojących i nawilżających, aby wspomóc proces regeneracji skóry, zwłaszcza w pierwszych dniach po zabiegu.

#### 7. CZY ZALECANA JEST SPECJALNA PIELEGNACJA SKÓRY PO ZABIEGU?

Oprócz konieczności stosowania ochrony przeciwśłonecznej, lekarz może zalecić systematyczne i długotrwałe stosowanie określonych kosmetyków. Pamiętaj również, że nawet przy ciągłym i niezbędnym stosowaniu środków z filtrem przeciwśłonecznym, należy zachować szczególną ostrożność przy bezpośredniej i pośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, ponieważ przez pewien czas Twoja skóra będzie wyjątkowo wrażliwa.

#### 8. ILE MOŻE POTRWAĆ REKONWALESCENCJA?

Można od razu powrócić do codziennych zajęć.

# IPL-SQ<sup>®</sup> DOSTONAŁA BROŃ W WALCE Z NIECHCIANYM OWŁOSIENIEM

## KONIEC Z NIECHCIANYM OWŁOSIENIEM.

Poznaj ETHEREA-MX<sup>®</sup> IPL-Sq<sup>®</sup> - technologię, która pomoże Ci pozbyć się niepożądanego owłosienia – nawet w przypadku skóry o wyższych fototypach. Koniec z tradycyjnymi, agresywnymi metodami depilacji!

Najnowocześniejsza technologia IPL Sq<sup>®</sup> zapewnia widoczne rezultaty w zmniejszeniu ilości i gęstości włosów już po kilku zabiegach. Zabiegi polecane są zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, gwarantując bezpieczne, skuteczne i trwałe rezultaty.



## 1. JAK TO DZIAŁA?

Cały sekret technologii IPL-Sq® polega na wiązce światła, która oddziałuje tkankę w selektywny i kontrolowany sposób, poprzez przekształcenie energii świetlnej w ciepło, powoduje uszkodzenie i zniszczenie mieszków włosowych. Proces ten postępuje stopniowo – stopniowo dochodzi do zmniejszenia gęstości, objętości i grubości włosów poddawanych zabiegowi. Nie dochodzi do uszkodzenia naskórka, ponieważ światło przenika w głąb tkanki.

## 2. JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA?

- stopniowe i trwałe usuwanie owłosienia w przypadku różnych fototypów;
- zapobieganie i leczenie zapalenia mieszków włosowych poprzez ich uszkodzenie;
- redukcja owłosienia na twarzy, szyi, ciele.

## 3. ILE ZABIEGÓW NALEŻY WYKONAĆ?

Zazwyczaj zaleca się terapię złożoną z 4 do 12 zabiegów. Ilość zabiegów zależy od wielkości obszaru poddawanego zabiegom, a także od grubości i głębokości włosów. Należy pamiętać, że do osiągnięcia maksymalnych rezultatów potrzeba kilku sesji terapeutycznych. Porozmawiaj ze swoim lekarzem i dowiedz się, jaki plan terapii będzie dla Ciebie właściwy.

## 4. KIEDY WIDAĆ PIERWSZE REZULTATY?

Gdy włosy z poddawanego zabiegom obszaru zaczynają odrastać, co trwa przez kilka tygodni po zabiegu, już wtedy można zauważyć, że są słabsze, cieńsze i jest ich mniej. Właściwe efekty pojawiają się w kolejnych tygodniach, gdy następuje skuteczna redukcja owłosienia we wszystkich fazach wzrostu włosów.

## 5. CZY ZABIEGI SĄ BOLESNE?

Większość pacjentów zgłasza jedynie niewielkie uczucie podobne do szczypania, czy odczucie zbyt intensywnego rozgrzania skóry - zwłaszcza w miejscu zabiegu i tylko podczas naświetlania. W niektórych przypadkach intensywność terapii może powodować dyskomfort. Twój lekarz wskaże najlepszy sposób postępowania, aby zwiększyć komfort podczas terapii.

## 6. CZEGO NALEŻY OCZEKIWAĆ NATYCHMIAST PO ZABIEGU?

Na skórze poddanej zabiegowi może pojawić się zaczerwienienie i lekkie do umiarkowanego odczucie ciepła. Twoja skóra w miejscu zabiegu będzie znacznie bardziej wrażliwa niż zwykle, może pojawić się lekka zmiana odcienia i obrzęk. Twój lekarz wskaże najbardziej odpowiednie środki pielęgnacji po zabiegu, które mogą obejmować - oprócz nałożenia kremu lub emulsji przeciwsłonecznej - zastosowanie okładów z lodu, kremów kojących i nawilżających, aby wspomóc proces regeneracji skóry, zwłaszcza w pierwszych dniach po zabiegu.

## 7. CZY ZALECANA JEST SPECJALNA PIELĘGNACJA SKÓRY PO ZABIEGU?

Oprócz ochrony przeciwsłonecznej, lekarz może zalecić systematyczne i długotrwałe stosowanie określonych kosmetyków. Pamiętaj również, że nawet przy ciągłym i niezbędnym stosowaniu środków z filtrem przeciwsłonecznym, należy zachować szczególną ostrożność przy bezpośredniej i pośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, ponieważ przez pewien czas Twoja skóra będzie wyjątkowo wrażliwa.

## 8. ILE MOŻE POTRWAĆ REKONWALESCENCJA?

Można od razu powrócić do codziennych zajęć.



# TERAPIA ZMIAN NACZYNIOWYCH Z IPL-SQ®

## PROMIENNA SKÓRA BEZ WIDOCZNYCH NACZYNEK.



NW dzisiejszych czasach zarówno mężczyźni jak i kobiety mają możliwość redukcji i likwidacji zmian naczyniowych zlokalizowanych na twarzy dzięki zaawansowanej technologii, który gwarantuje rzeczywiste i trwałe rezultaty bez żadnych ograniczeń. Technologia ETHEREA-MX® IPL-SQ® oferuje niezwykle skuteczną, bezpieczną, bez okresu rekonwalescencji terapię różnorodnych zmian naczyniowych.

### 1. JAK TO DZIAŁA?

Zastosowanie najnowocześniejszej technologii IPL-Sq® w terapii zmian naczyniowych opiera się na selektywnej absorpcji energii przez hemoglobinę, w wyniku czego dochodzi do stopniowego i w kontrolowanego miejscowego rozgrzania zmian naczyniowych. W efekcie dochodzi do ich obkurczenia i zamknięcia naczyń, otaczająca skóra pozostaje nienaruszona. Oczekiwany rezultatem zabiegu jest zniknięcie naczynka spod powierzchni skóry.

### 2. JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA?

- leczenie drobnych, rozszerzonych naczynek;
- redukcja i usuwanie różnych zmian naczyniowych, takich jak trądzik różowaty, poikilodermia i naczylniaki;
- terapia zmian naczyniowych zlokalizowanych zwłaszcza w obrębie skrzydełek nosa, okolicy ust i na policzkach.

### 3. ILE ZABIEGÓW NALEŻY WYKONAĆ?

Ilość zabiegów uzależniona jest od wielkości leczonego obszaru i od rodzaju zmian. Zwykle pierwsze rezultaty pojawiają się już po pierwszej sesji zabiegowej. Z każdym kolejnym zabiegiem zachodzi dalsza poprawa kondycji skóry. Twój lekarz przygotuje indywidualny plan terapii dostosowany indywidualnie do Twoich potrzeb.

#### **4. KIEDY WIDAĆ PIERWSZE REZULTATY?**

W niektórych przypadkach zmiany naczyniowe poddane zabiegowi znikają natychmiast po zabiegu. Należy podkreślić, że rezultat ten może być nietrwały - gdy w kolejnych dniach zostanie naturalnie przywrócony dopływ krwi, naczynia mogą stać się widoczne. Właściwe i trwałe rezultaty widoczne są już kilku tygodniach od wykonania zalecanej serii zabiegów. Pamiętaj - żeby efekty terapeutyczne były naprawdę skuteczne i widoczne, zabiegi należy powtarzać. Twój lekarz opracuje konkretny plan terapeutyczny, opierając się na indywidualnym podejściu, diagnozie i ocenie Twojego przypadku.

#### **5. CZY ZABIEGI SĄ BOLESNE?**

Większość pacjentów zgłasza jedynie niewielkie uczucie podobne do szczypania, czy odczucie zbyt intensywnego nagrzewania - zwłaszcza w miejscu zabiegu i tylko podczas naświetlania. W niektórych przypadkach intensywność terapii może powodować dyskomfort. Twój lekarz wskaże najlepszy sposób postępowania, aby zwiększyć komfort podczas terapii.

#### **6. CZEGO NALEŻY OCZEKIWAĆ NATYCHMIAST PO ZABIEGU?**

Na skórze poddanej zabiegowi może pojawić się zaczerwienienie i lekkie do umiarkowanego odczucie ciepła. Twoja skóra w miejscu będzie znacznie bardziej wrażliwa niż zwykle. Większość naczynek może zmienić zabarwienie, mogą stać się nieco ciemniejsze niż zwykle, inne zaś mogą nawet zniknąć na jakiś czas i ponownie pojawić się po kilku godzinach. Lekarz wskaże sposób pielęgnacji po zabiegu najbardziej odpowiedni dla Twojego przypadku.

#### **7. CZY ZALECANA JEST SPECJALNA PIELĘGNACJA SKÓRY PO ZABIEGU?**

Oprócz ochrony przeciwstłonecznej, lekarz może zalecić systematyczne i długotrwałe stosowanie określonych kosmetyków. Pamiętaj również, że nawet przy ciągłym i niezbędnym stosowaniu środków z filtrem przeciwstłonecznym, należy zachować szczególną ostrożność przy bezpośredniej i pośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, ponieważ przez pewien czas Twoja skóra będzie wyjątkowo wrażliwa.

#### **8. ILE MOŻE POTRWAĆ REKONWALESCENCJA?**

Można od razu powrócić do codziennych zajęć.

# ROZJAŚNIANIE I USU- WANIE PRZEBARWIEŃ POSŁONECZNYCH PRZY UŻYCIU IPL-SQ®

NOWE PODEJŚCIE  
DO USUWANIA ZMIAN  
BARWNIKOWYCH.

ETHEREA-MX® IPL-Sq® to doskonały wybór najnowocześniejszej technologii dla Pacjentów ze wskazaniami do terapii zaburzeń pigmentacyjnych i fotostarzenia. Zabiegi są całkowicie bezpieczne, a czas rekonwalescencji i rezultaty lepsze niż inne technologie..

## 1. JAKA TO TERAPIA?

ETHEREA® IPL-Sq to najnowocześniejsza technologia, która wykorzystując energię precyzyjnego i kontrolowanego naświetlania oddziałuje w sposób szczególny na przebarwienia postępczne i inne rodzaje hiperpigmentacji.

Kiedy światło ETHEREA® IPL-Sq® dociera do leczonej tkanki, jego energia przekształca się w ciepło i dochodzi do zniszczenia złogów pigmentu.

ETHEREA® IPL-Sq® jest nie tylko powszechnie uznawana za jedną z najnowocześniejszych metod terapeutycznych dostępnych na rynku, ale także zapewnia bezpieczeństwo i doskonałe rezultaty.

## 2. JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA?

- usuwanie wielu różnych powierzchniowych zmian barwnikowych;
- usuwanie oraz/ lub rozjaśnienie przebarwień i niektórych rodzajów znamion wrodzonych.

## 3. ILE ZABIEGÓW NALEŻY WYKONAĆ?

Zazwyczaj zaleca się terapię obejmującą od 2 do 4 sesji zabiegów. Z drugiej strony całkowita liczba sesji zależy od wskazania i intensywności leczenia. Bywa tak, że doskonałe rezultaty osiąga się już po jednej sesji. Dowiedz się od swojego lekarza, jaki plan leczenia będzie dla Ciebie najlepszy.

## 4. KIEDY WIDAĆ PIERWSZE REZULTATY?

Rezultaty widoczne są już po kilku dniach po zabiegu, gdy skóra w miejscach poddanych zabiegowi zaczyna się goić i regenerować. Może się zdarzyć, że przez pewien czas miejsca te zachowują inny wygląd niż otaczająca skóra, mogą być ciemniejsze, zaczerwienione. Stan skóry powinien się poprawić, a przebarwienia ulec rozjaśnieniu w czasie ok. 2 do 6 tygodni po zabiegu.

## 5. CZY ZABIEGI SĄ BOLESNE?

Większość pacjentów zgłasza jedynie niewielkie uczucie podobne do szczypania lub odczucie zbyt intensywnego nagrzewania, zwłaszcza w miejscu poddanym zabiegowi i tylko podczas naświetlania. W niektórych przypadkach intensywność terapii może powodować dyskomfort. Zwykle większość pacjentów dobrze znosi leczenie przy zastosowaniu znieczulenia oraz/ lub leków przeciwbólowych przepisanych przez lekarza (w zależności od intensywności i wielkości obszaru leczenia). Twój lekarz wskaże najlepszy sposób działania, aby zwiększyć komfort podczas zabiegu.

## **6. CZEGO NALEŻY OCZEKIWAĆ NATYCHMIAST PO ZABIEGU?**

Prawdopodobne jest, że pod koniec zabiegu pojawi się pewne zaczerwienienie i lekkie do umiarkowanego odczucie ciepła. Twoja skóra w miejscu zabiegu będzie znacznie bardziej wrażliwa niż zwykle, a także może lekko poszarzeć i opuchnąć. Twój lekarz wskaże najbardziej odpowiednie środki pielęgnacji po zabiegu, które mogą obejmować - oprócz nałożenia kremu lub emulsji przeciwsłonecznej - zastosowanie okładów z lodu, kremów kojących i nawilżaczy, aby wspomóc proces pielęgnacji skóry - zwłaszcza w pierwszych dniach po zabiegu.

## **7. CZY ZALECANA JEST SPECJALNA PIELĘGNACJA SKÓRY PO ZABIEGU?**

Oprócz ochrony przeciwsłonecznej, lekarz może zalecić systematyczne i długotrwałe stosowanie określonych kosmetyków. Pamiętaj, że nawet przy ciągłym stosowaniu środków z filtrem przeciwsłonecznym, należy zachować szczególną ostrożność przy bezpośredniej i pośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, ponieważ przez pewien czas Twoja skóra będzie wyjątkowo wrażliwa.

## **8. ILE MOŻE POTRWAĆ REKONWALESCENCJA?**

Całkowita regeneracja skóry trwa kilka dni, a większość Pacjentów może powrócić do codziennych zajęć do 2-3 dni po zabiegu. Łagodny rumień może utrzymywać się do kilku dni po zabiegu.







A **VYDENCE Medical™** jest jedną z największych firm produkujących urządzenia medyczne, koncentrującą się na dermatologii, chirurgii plastycznej i chirurgii naczyniowej w Brazylii. Oferuje najnowsze rozwiązania technologiczne i zaspokaja wszystkie szczególne wymagania pacjentów i lekarzy - od trądziku aktywnego, poprzez lokalne otluszczenia, stymulację wzrostu włosów, odmładzanie, usuwanie owłosienia i usuwanie tatuaży. VYDENCE™ oferuje najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i najwyższą skuteczność działania.



@infinita